



## ALKOLMETRE ÇALIŞMA TALİMATI



KODU.BL.TL.15

YAYIN TARİHİ: 18.10.2016

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: 00

SAYFA NO: 1 / 1

**1.AMAÇ:** Acil serviste alkolmetre ile çalışma prensiplerini belirlemek.

**2.KAPSAM:** Acil hekiminin talimatı doğrultusunda yapılacak nefeste alkol ölçümünü kapsar

**3.SORUMLULAR:** Ölçümün yapılmasının isteyen Acil Servis Hekimi, Birim Sorumluları, birimde çalışan tüm hemşire ve sağlık memurları hasta başı test cihazlarından sorumlu Laboratuvar Teknisyeni ve Laboratuvar Uzmanı.

### 4. UYGULAMA:

Alkolmetre ile yapılacak ölçümlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Alkolmetre cihazının kalibrasyonu yapılmalı ve kalibrasyon sertifikası dosyalanmalıdır.
- Cihazın kullanım anında kalibrasyon süresi geçmemiş olmalıdır.
- Cihaz, kalibrasyon süresi bitmeden en geç 1 (bir) hafta önce kalibre edilmelidir,
- Cihazın çalışır halde olduğundan emin olunmalıdır
- Ölçüm yapılacak kişiye nefes üfleme miktarı yeterli oranda yaptırılmalı aksi takdirde ölçüm geçersiz sayılmalıdır
- Kişiye aynı gün içerisinde emniyet mensuplarınca ölçüm yapılmışsa tekrar alkolmetre ile ölçüm yapılmamalı, kanda alkol düzeyi çalışılmalıdır
- Alkolmetre ile test ölçümü sadece acil servis hekiminin uygun gördüğü hasta grubunda yapılmalıdır
- Aynı şahısta tekrarlanan ölçümlerde farklı sonuçların alınması halinde kanda alkol testi yapılmalıdır
- Alkolmetre cihaz ölçümüne uyum sağlamayan şahıslarda kanda alkol testi yapılmalıdır.

### 5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Hasta Başı Test Cihazları Yönetim Talimatı BL.TL.08

Hasta Başı Test Cihazı Envanter Formu BL.FR.04

### 6. DAĞITIM

Acil servis doktor, hemşire ve sağlık memurları

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Biyokimya Uzmanı	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim