


	KÜLTÜR TESTLERİ GÜVENLİ ÇALIŞILMA TALİMATI			
KODU:ML.TL.12	YAYIN TARİHİ:23.06.2013	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ:	SAYFA NO:

### 1. AMAÇ:

Mikrobiyoloji laboratuvarında kültür testlerinin güvenli çalışmasını sağlamak.

### 2. KAPSAM:

Kültür testlerinin transportu, ekimi ve sonuçlandırması ile ilgili birimleri kapsar.

### 3.SORUMLULAR:

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan uzman tabip ve teknik elemanlar.

### 4.UYGULAMA:

- 4.1. Gelen numunelen dış ortamla teması olmayacak biçimde kapalı kaplarda laboratuvara ulaştırılmalı.
- 4.2. Kültür için kullanılan besiyerleri buzdolabında +4C’de saklanmalı.
- 4.3. Numune ekimi ve antibiyogram çalışması güvenlik kabini içinde yapılmalı.
- 4.4. Çalışılırken eldiven, maske, önlük ve diğer koruyucu malzemeler kullanılmalı.
- 4.5. Numuneler vücutla temas etmemeli, koklanmamalıdır.
- 4.6. Ekimi yapılan numuneler, kullanılan disposable malzemeler kırmızı atık poşetlerine atılmalıdır.
- 4.7. Enjektörler ise sarı kapaklı kutuya atılır.
- 4.8. Ekim yapılmış besiyerler kapağı kapalı şekilde etüve yerleştirilir.
- 4.9. Sonuçlanmış besiyer plakları kapalı şekilde kırmızı atık poşetlerine atılmalıdır.
- 4.10.Numunelerin vücutla teması durumunda laboratuvar güvenlik rehberindeki talimatlar uygulanır.
- 4.11.Çalışma sonunda güvenlik kabininin ultraviyole lambası 30 dakika çalıştırılır.
- 4.12.Gün sonunda güvenlik kabininin temizliği yapılır.

### 5.DAĞITIM:

Mikrobiyoloji laboratuvarı çalışanları  
Enfeksiyon kontrol birimi

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Mikrobiyoloji Uzmanı	Kalite Direktörü	Başhekim